

Entonces

Fácil

Nueva bomba de infusión de levodopa Para infusión de 5 mg/ml Infusión en Enfermedad de Parkinson

Nuevo

**Uso subcutáneo**

Everest Pharma GmbH
Oberburgau 3, 4866 Unterach/Austria
www.everpharma.com


Dacepton®

Cloridrato de apomorfina

DAC/INT/04/2024/23
D-mine PumpSalesAid INT V03

El único sistema de bomba volumétrica a base de mg.

Desarrollado específicamente para pacientes con enfermedad de Parkinson

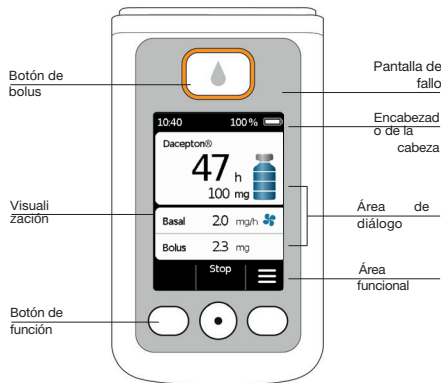


- Mg basado en menos errores de dosis
- Proceso de llenado automático
- Para menos pasos de manejo y Más seguridad
- Programable individualmente Con 5 tarifas
- guía intuitiva de menú en idioma local
- control electrónico de llenado
- menos tiempo necesario para la capacitación
- historial de datos

El manejo intuitivo hace que la vida sea fácil.

Fácil manejo en solo 5 pasos para más autoautonomía




Paso 1: Preparación
Tome la bomba de mina® estéril
El embalse fuera de la ampolla y conectáelo a la bomba

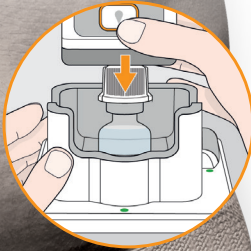


Paso 2: conexión
Fija toda la bomba con el depósito y el adaptador conectado en el frasco.



Paso 3: llenado
Coloque la bomba en la estación de acoplamiento y comience el proceso de llenado.

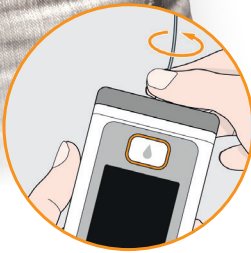

Paso 4: conexión
Conecte el conjunto de infusión a la bomba.

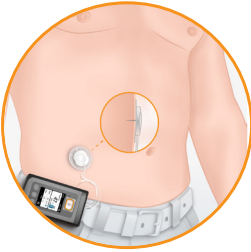

Paso 5: Inicio
Después del proceso de cebado, la piel se perfora y la infusión se inicia.

